

ClearView®

Uterine Manipulator



Avec son amplitude de mouvement de 210° et sa poignée rotative, le manipulateur utérin ClearView® facilite le contrôle à une main et permet ainsi au chirurgien de manipuler l'utérus de façon autonome.



UN MANIPULATEUR UTÉRIN



Visibilité optimale

Le ClearView permet une antéversion à 120° et une rétroversion à 90°, ainsi qu'un mouvement latéral pour une visibilité optimale.



Contrôle d'une seule main

La poignée de commande rotative auto-serrante permet au chirurgien de manipuler le dispositif sans avoir besoin d'un assistant.



À usage unique

Le dispositif ClearView est entièrement jetable.



Positionnement du patient

Le ClearView pivote au niveau du col de l'utérus et permet au patient de rester en décubitus dorsal.

Comprend tous les accessoires dont vous avez besoin

Le ClearView est conditionné dans un plateau stérile rassemblant tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien la procédure.

Chromotubation

Le port d'injection de colorant permet de procéder à une chromotubation, si nécessaire.

Contrôle utérin

La seringue de 12 ml incluse gonfle le ballonnet situé à l'extrémité de la tige.



Sonde de dilatation à usage unique

La sonde de dilatation incluse permet de mesurer et de préparer le col de l'utérus.

Deux tailles

La bague clipsable permet de réduire la longueur de la tige d'1 cm et donc de disposer de deux tailles avec un seul dispositif.

VOUS EFFECTUEZ UNE HYSTÉRECTOMIE LAPAROSCOPIQUE ?

ClearView® Total Uterine Manipulator

Le ClearView® TOTAL dispose des mêmes caractéristiques que le ClearView* avec l'ajout d'un ballonnet d'occlusion pré-monté et de trois cupules de colpotomie de tailles différentes. Le ballonnet d'occlusion empêche la perte de pneumopéritoine une fois l'incision de colpotomie effectuée pendant une hystérectomie laparoscopique.



4 cm



3,5 cm



3 cm

* à l'exclusion du port d'injection de colorant

MISE EN PLACE ET UTILISATION DE CLEARVIEW




Vérification du ballonnet
Utiliser la seringue fournie pour tester le ballonnet avant l'insertion.




REMARQUE : la longueur de la tige doit être inférieure de 1 cm à la longueur mesurée.

Dilatation et mesure de l'utérus
Sonder l'utérus. Si nécessaire, dilater le col de l'utérus.

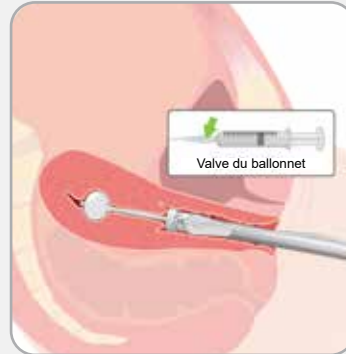

Insertion et gonflage du dispositif
Lubrifier l'extrémité distale et insérer le dispositif dans l'utérus. Gonfler lentement

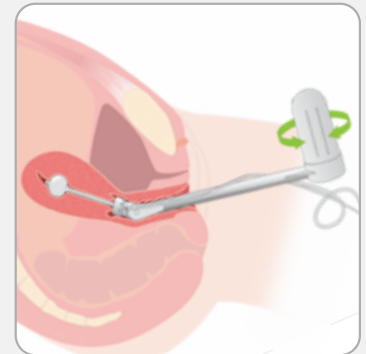

Contrôle de la poignée
Faire pivoter la poignée pour manipuler l'utérus

Consulter le mode d'emploi pour les instructions complètes, les avertissements, les contre-indications et les précautions.

SUPPORT PRODUIT

Informations pour la commande

Description du produit	Code produit	Qté/boîte
Manipulateur utérin ClearView - Tige de 7 cm	UM700	5/boîte
Manipulateur utérin ClearView - Tige de 9 cm	UM900	5/boîte
ClearView TOTAL - Tige de 7 cm	UM750	5/boîte
ClearView TOTAL - Tige de 9cm	UM950	5/boîte
Sonde de Dilatation à usage unique Clearprobe (Stérile)	DSD-1000	50/boîte

Distributeur local :

clinicalinnovations.fr | clinicalinnovations.com

MVF | Clinical Innovations

ZA du Serroir n°2 - CS 40034

Lay Saint Christophe, 54690

Téléphone +33 (0) 3 83 22 20 76 | Fax +33 (0) 3 83 22 65 67

dms@mvf.fr

© Clinical Innovations, LLC. Tous droits réservés. | ART-0123 Rev. 01

