

ClearView®

Uterine Manipulator



De ClearView® uterusmanipulator, met zijn 210° bewegingsbereik en roterende handgreep, vergemakkelijkt de bediening met één hand, zodat de chirurg de uterus onafhankelijk kan manipuleren.



EEN UTERUSMANIPULATOR



Duidelijke zichtbaarheid

ClearView biedt 120° anteversie en 90° retroversie alsmede laterale beweging voor duidelijke zichtbaarheid.



Bediening met één hand

Met de zelfhoudende roterende bedieningshendel kan de chirurg het hulpmiddel onafhankelijk van een assistent manoeuvreren.



Eenmalig gebruik

ClearView is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.



Positionering van de patiënt

ClearView draait bij de baarmoedermond en biedt de patiënt de mogelijkheid om op zijn/haar rug te blijven liggen.

VERPAKT MET WAT U NODIG HEBT

ClearView is verpakt in een steriele tray met alles wat u nodig hebt om de procedure uit te voeren.

Chromotubatie

De kleurstofinjectiepoort kan, indien nodig, worden gebruikt voor chromotubatie.

Baarmoedercontrole

Met de meegeleverde 12 ml spuit wordt de ballon van de tip opgeblazen.



Wegwerpbaar sondeer-dilatator

De meegeleverde dilatator helpt bij het meten en voorbereiden van de cervix.

Twee maten

De afstandhouder verkort de tip met 1 cm, waardoor één hulpmiddel twee maten heeft.

DOET U EEN LAPAROSCOPISCHE HYSTERECTOMIE?

ClearView® Total

Uterine Manipulator

ClearView® TOTAL heeft dezelfde functies als ClearView met de toevoeging van een vooraf bevestigde occluder-ballon en drie colpotomiecupps met verschillende maten. De occluder-ballon voorkomt het verlies van pneumoperitoneum zodra tijdens laparoscopische hysterectomie de colpotomie-incisie wordt gemaakt.



4 cm



3,5 cm



3 cm

CLEARVIEW INSTELLEN EN GEBRUIKEN




Ballon controleren
Gebruik de meegeleverde spuit om de ballon voorafgaand aan het inbrengen te testen.



Baarmoeder dilateren en sonderen
Sondeer de baarmoeder. Dilateer, indien nodig, de cervix.



Hulpmiddel inbrengen en opblazen
Smeer de distale tip en breng deze in de baarmoeder in. Langzaam opblazen.

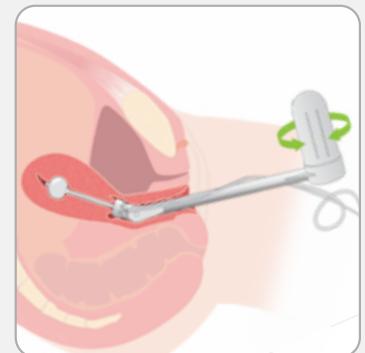

Bedieningshendel
Draai de hendel om de baarmoeder te manipuleren.

Zie de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies, waarschuwingen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen.

PRODUCTONDERSTEUNING

Bestelinformatie

Beschrijving van het product.	Productcode	Aantal in doos
ClearView uterusmanipulatorset - 7 cm tip	UM-700	5 stuks
ClearView uterusmanipulatorset - 9 cm tip	UM-900	5 stuks
ClearView TOTAL set 7 cm tip	UM-750	5 stuks
ClearView TOTAL set 9 cm tip	UM-950	5 stuks
Wegwerpbare sondeer-Dilatator (Steriel)	DSD-1000	50 stuks

Lokale distributeur:

clinicalinnovations.com
Clinical Innovations Benelux B.V.
Wijde Wade 3 | 3439 NP Nieuwegein
Nederland
Telefoon +31 (0) 30 310 04 69
info.europe@clinicalinnovations.com
© Clinical Innovations, LLC. Alle rechten voorbehouden. | ART-0125 Rev. 01

